

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kavo.nt-rt.ru> || koc@nt-rt.ru

Очищающее и дезинфицирующее средство DEKASEPTOL



Очищающее и дезинфицирующее средство на основе кокоса

Гигиеническое дезинфицирующее средство с содержанием глюкопротамина и чистящая смесь для сплюнопылеулавливания, аспираторных систем и плевательниц.

Очистка зарослей бактерий

Опасная зона – аспирационное устройство. В нем собираются грязь и бактерии, процветают грибки и вирусы, и все это угрожает здоровью. Уничтожайте микробы оружием, созданным природой!

Основным активным ингредиентом геля DEKASEPTOL является глюкопротамин – производное, получаемое из кокосов. Глюкопротамин – это антимикробный компонент, намного превосходящий очищающее действие бигуанида или производных фенола. Это гигиеническое средство специально предназначено для тщательной очистки аспирационных устройств, плевательниц и всасывающих шлангов.

Для вас это средство – одна из возможностей получать удовольствие на рабочем месте: гель DEKASEPTOL уничтожает бактерии и вирусы, облегчая вам работу. Посмотрите сами!


DEKASERPTOL предназначен для

- очистки;
- дезодорирования
- дезинфекции

Безопасно, чисто, экономично, быстро

- Высокая эффективность: антибактериальное, противовирусное, фунгицидное средство.
- Экономичность: сменный контейнер объемом 6 л.
- Экологичность: в составе нет альдегида, фенола и хлора.
- Экономия времени: благодаря мерному колпачку средство можно сразу использовать.
- Практичность: средство не нужно смешивать с чем-либо еще.
- Зарегистрировано в РФ.

Значительная экономия - наилучший выбор!

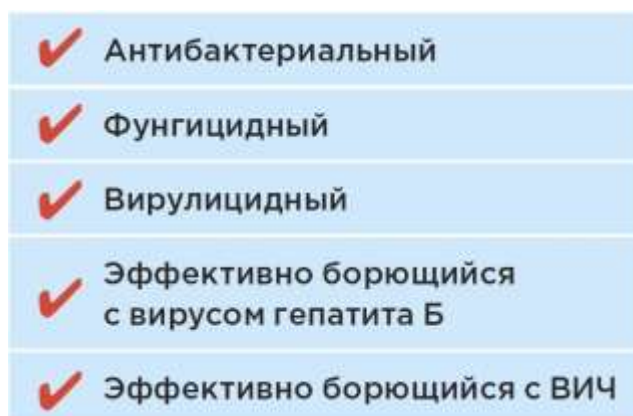

Внимание...

Не нужно перемешивать, встряхивать или смешивать с чем-либо еще

Избавьте себя от долгого смешивания и утомительного использования!
DEKASEPTOL – это уже готовая к работе смесь.

Позаботьтесь о себе и своем оборудовании

Отсутствие необходимости смешивать гель означает, что вы не допустите никаких ошибок при дезинфекции, у геля не будет контакта с чувствительными руками, вы не запачкаете и не испортите рабочие поверхности.

Действительно экономичное средство

Благодаря экономичному мерному колпачку ни капли геля не будет потрачено впустую. Наиболее экономически выгодно использование 6-литровых сменных контейнеров

Утилизация без забот

Созданное природой остается в ней. Гель DEKASEPTOL полностью экологически безвреден и, в соответствии с руководящими принципами Организации

экономического сотрудничества и развития (OECD), легко и быстро биоразлагаем.

1.000.7205

Дезинфицирующий гель Dekaseptol

Емкость объемом 6л



0.224.6876

Дозатор

Для емкости объемом 6л

Марш!

Быстрое выполнение работ означает больше свободного времени

Выиграйте немного времени для себя!

С гелем DEKASEPTOL очистка будет не только легкой, но и быстрой. Просто закачайте гель в шланг или налейте в плевательницу. Оставьте средство, чтобы оно подействовало (см. инструкцию по применению).

Конец рабочего дня, а вам еще нужно все продезинфицировать?

Не беда! Потому что DEKASEPTOL экономит драгоценные минуты на очистке всех всасывающих устройств.

Подсчитайте затраченное время на обычную дезинфекцию.

Вы быстро поймете, что с помощью геля сможете сэкономить не менее 20 минут в неделю.


Экономия времени составит до 2 рабочих дней в году.

Время, которое благодаря гелю DEKASEPTOL вы можете потратить на что-то получше, чем утомительная дезинфекция. Например, вы сможете быстрее оказаться дома.

1.000.7204

Дезинфицирующий гель Dekaseptol

Набор из трех бутылок по 1л и дозатора

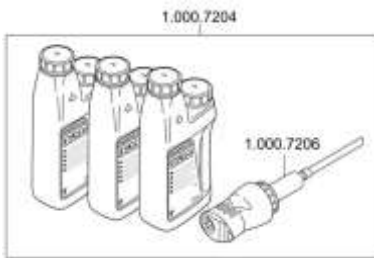

Простота в использовании

Гель DEKASEPTOL представляет собой готовую к использованию смесь, которая работает очень быстро. Примерно за 80 секунд осуществляется очистка всей аспирационной системы.

Дезинфекция системы слюнопылеулавливания и всасывающих шлангов высокого давления



1. При необходимости закачайте жидкость с помощью устройства KaVo AQUAmat. Если у вас нет AQUAmat, подайте воду из подходящего контейнера с чистой водой.



2. Вставьте аспирационную канюлю в мерный колпачок и нажмите на него один раз.



4. Вытащите шланг из мерного колпачка и верните его на стоматологическую установку.



3. Прокатайте отмеренную дозу геля DEKASEPTOL через шланг и повторите шаги 1-3.

Дезинфекция плевательницы



1. Нажмите на мерный колпачок.



3. Равномерно распределите гель DEKASEPTOL щеткой и оставьте на 5 минут.



2. Налейте отмеренную дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу.



4. Промойте плевательницу щеткой под проточной водой.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kavo.nt-rt.ru> || koc@nt-rt.ru